

らくらく9キー 取扱説明書

最新バージョンでご使用ください。

1. 接続

よむべえの電源を入れる前に、USB ケーブルの幅の狭い端子を9キー側に、幅の広い端子をよむべえのUSB 接続口に接続します。

2. キー操作

USB で接続されている方を「上」、手前側を「下」として記載します。

一つのキーには、1度押しと長押しの操作が割り当てられています。

2.1. 1度押し操作

下段 左、読取翻訳.

下段 真ん中、1行下.

下段 右、クラウド認識.

中段 左、左の文節.

中段 真ん中、停止・再開・確定.

中段 右、右の文節.

上段 左、取り消し.

上段 真ん中、1行上.

上段 右、読書機の設定.

2.2. 長押し操作

下段 左、連続読取翻訳.

下段 真ん中、次の文書へ.

下段 右、連続読取.

中段 左、ページ先頭・前のページ.

中段 真ん中、ページ削除.

中段 右、次のページ.

上段 左、名前を付ける.

上段 真ん中、前の文書へ.

上段 右、拡張メニュー.

3. 設定と拡張メニュー

設定と拡張メニューの中では、
真ん中を中心として、
上下のキーで項目を移動、
左右のキーで項目内での状態の変更、
真ん中のキーで確定となります。
キャンセルは、左上のキーです。



問い合わせ先：株式会社アメディア

partner@amedia.co.jp

電話：03-6915-8597 (平日 10時から 12時、13時から 15時)