

## 外見の説明



正面：ロゴが印刷されており凹凸が少ない面

- ① 保護キャップ（色センサーの保護とキャリブレーション用カバーを兼ねます。はずすとノズルが出てきます）
- ② スライドスイッチ（4段階にスライドします。正面から見て上側にスライドスイッチが来る状態で、一番左側が電源オフ、右に1段階行くとオンで、音量1、次の段階で音量2、次の段階で音量3）



下面：

- ③ キャリブレーションボタン（長方形の出っ張り枠で囲まれており、CAL と印刷されています）
- ④ イヤホンジャック（3.5mm の丸穴が開いています。付属のイヤホンや市販の3.5mm ジャックのイヤホンを利用できます）

裏面：

- ⑤ 盛り上がった円形のスピーカークリル
- ⑥ 電池カバー

## キャリブレーションについて

お手元に届いたらキャリブレーション（認識の精度を初期化）を行うことをお勧めします。

方法は、保護キャップを付けた状態で、下面にあるキャリブレーションボタンを押したまま、スライドスイッチを3段階（音量3）の位置にします。

数秒後、ピープ音が鳴り、「白」と発声します。これでキャリブレーションは終了です。

キャリブレーションは定期的に行うことをお勧めします。

\* 注意事項：保護キャップの裏面はキャリブレーション用の白い面となっています。この面が汚れているとうまくキャリブレーションができません。汚れた時は柔らかい布で拭いてください。汚れが取れない場合は、販売店までご連絡ください。

## 色読み上げ機としての使い方

1. スライドスイッチをお好みの音量の位置までスライドさせます。
2. 保護キャップをはずします。  
外したキャップはなくさないよう、本機の下面にくっつけることができます。
3. 色を知りたい物に保護キャップを外したところのノズル面を密着させます。  
\* ノズルと物は必ず密着してください。密着しないとピープ音が鳴り続けたり、正確な色が出ません。
4. 色を日本語で発声します。
5. 終了後はスライドスイッチをオフの位置にし、ノズルに保護キャップをかぶせてください。  
\* 注意：色は光の加減などで正確な色を発声できないことがあります。

## 明るさ確認機としての使い方

- 操作は、色読み上げと同じで、ノズル部分を物に密着させません。  
ノズルを上方向に向け、明るければピープ音が鳴り続けます。  
暗い場合は、「黒」や「とても暗い灰色」などといった暗く濃い色を発声します。  
終了後はスライドスイッチをオフの位置にし、ノズルに保護キャップをかぶせてください。

## 電池交換方法

1. 電池カバーの爪をもちあげ、蓋を開けます。
2. 中の長方形 PP3 電池をもちあげます。
3. 電池端子部分と本体に短いケーブルでつながった接続端子があります。
4. 電池端子と接続端子を外します。  
\* 電池と接続部分は堅い場合があります。取り外す際はケーブル等破損しないよう、ご注意ください。  
\* 付属電池は約4～6ヶ月持ちます。

## 注意事項

- ・ 保護キャップを外した状態で放置しないでください。使用後は必ず保護キャップを付けてください。ほこり等の影響でノズル部分の色センサーがうまく働かなくなります。
- ・ ノズル部分に物を押しこまないでください。
- ・ ノズル部分に指を入れないでください。
- ・ 水分があるところ、高湿度・高温な場所で利用しないでください。
- ・ 強い衝撃を与えないでください。
- ・ 分解しないでください。

---

## 保証書

- ・ 製品名 色読み上げ機「よみいろ」
- ・ 保証期間 年 月 日から1年間
- ・ ご住所
- ・ お名前
- ・ 電話番号
- ・ 販売店名

※お買い上げ日より1年間は無償にて修理いたします。但し不適切な利用による物理的な破損や火災などの天災による破損は除きます。