

エキスプロ 8

取扱説明書



目次

第1章	概要	2
	はじめに	2
	パッケージの内容	2
	各部の説明	3
	準備	5
第2章	エキスポ8の使い方	5
	電源を入れる方法	5
	電源を切る方法	5
	拡大モード	5
	拡大・縮小	6
	コントラストの変更	6
	ライトの点灯と消灯	6
	線とブラインド	6
	自動フォーカス	7
	画像を固定する方法	7
	固定した画像の閲覧	7
	ギャラリーモード	7
	ギャラリーの閲覧方法	8
	ギャラリーから画像を削除する方法	8
	外付けの画面を使う方法	8
第3章	パソコンに画像を転送する方法	9
第4章	メニュー	9
	メニューの閲覧と設定の変更	9
第5章	充電	11
第6章	困ったときは	12
付録A	安全とメンテナンス	13
付録B	仕様	14
付録C	保証	15

第1章 概要

はじめに


ご購入いただきありがとうございます。
本製品は、軽く使いやすい8インチ画面の携帯型拡大読書器です。
本製品を使用する前に、この取扱説明書をよくお読みください。
ご不明な点がございましたら、この取扱説明書の後ろに記載された株式会社アメディアにお問い合わせください。

パッケージの内容


- ・ 本体
- ・ USB 充電器
- ・ USB ケーブル
- ・ HDMI ケーブル
- ・ 画面保護フィルム
- ・ 取扱説明書（本書）
- ・ 保護ケース
- ・ クリーニングクロス
- ・ 保証書
- ・ ユーザー登録カード

各部の説明

正面

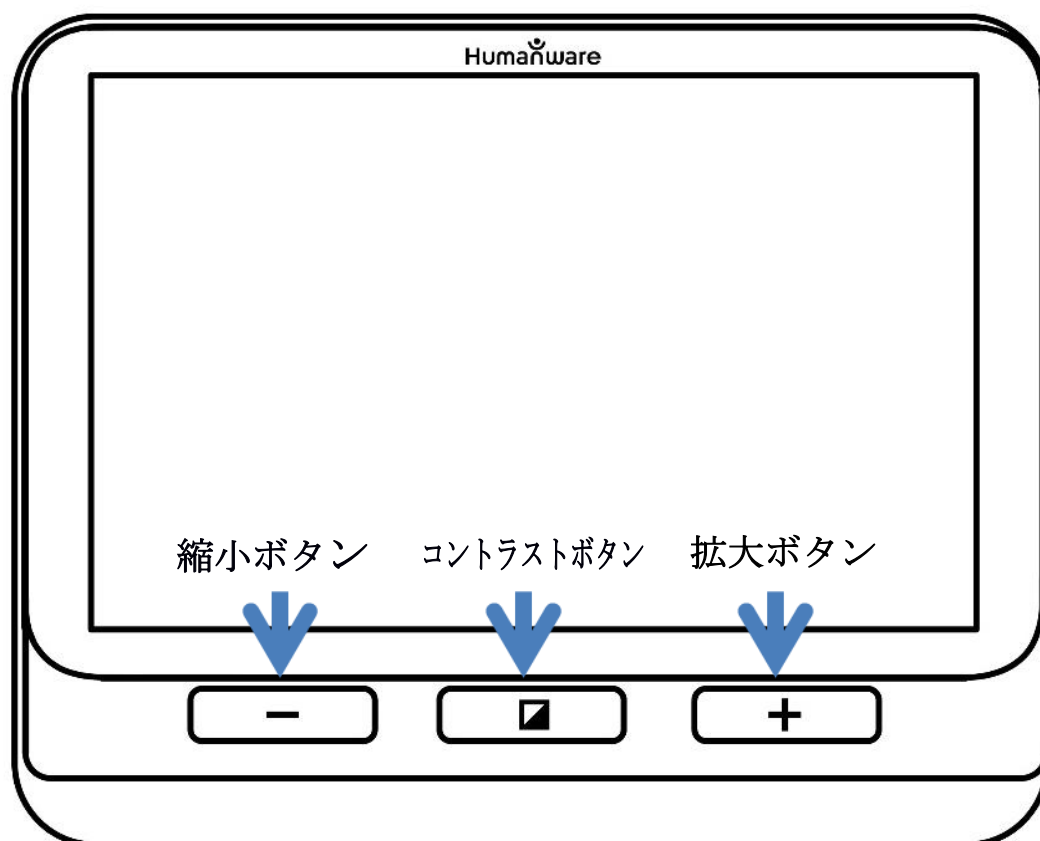


左側

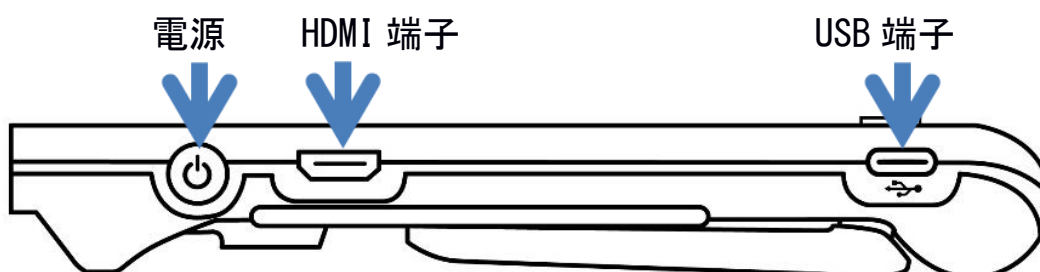


上側

スナップショットボタン

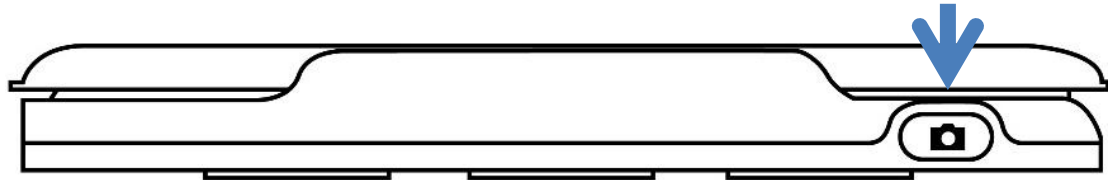

裏面

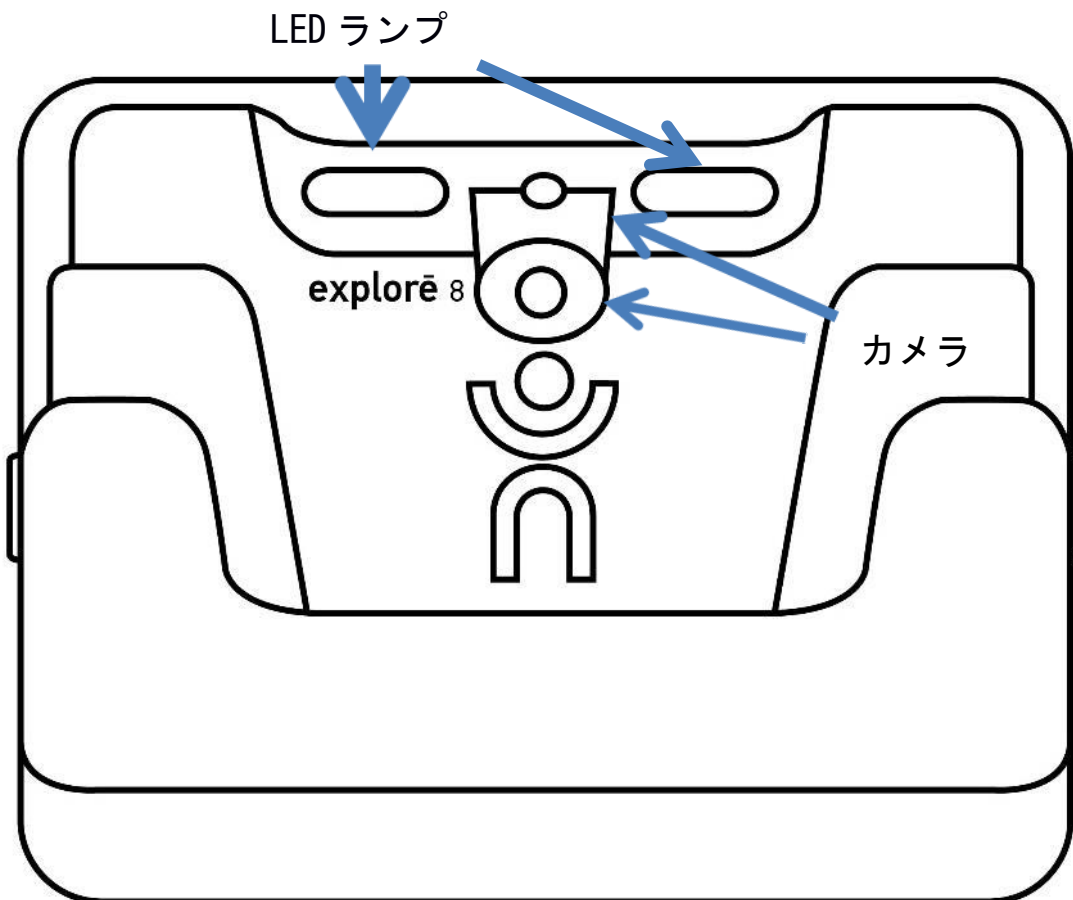

準備

1. USB 充電器に USB ケーブルを接続してください。
USB のマークがついている側を充電器に接続してください。
2. 画面を手前にしてください。USB ケーブルの端子の USB マークが画面とは反対側にあることを確認してください。本製品の左側にある USB 端子にケーブルを接続し、充電器をコンセントに差し込んでください。
《重要》 USB ポートにケーブルを挿入する際は十分にご注意ください。
3. バッテリーがフル充電になるまで充電してください。充電中は本製品が熱くなりますが、正常です。
4. フル充電になったら、取扱いに注意しながらケーブルを外してください。
5. 本製品を使い始めるには、電源ボタンを押すか、スタンドを開いてください。

第 2 章 エキスプロ 8 の使い方

電源を入れる方法

本製品を起動させるには、左側の電源ボタンを押してください。
後ろのスタンドを開き、対象物の上に置きます。数秒後に画面が点灯し、カメラから読み取った画像を表示します。これは拡大モードです。

電源を切る方法

電源を切るには、電源ボタンを押してください。
(スタンドを閉じてても電源は切れません)

拡大モード

拡大モードは、エキスポ 8 のメインの動作モードです。スタンドが閉じた状態だと、遠くにある物体を拡大できます。スタンドが開いた状態だと、近くにある物体、またはテーブルの上に置いてある印刷物を拡大できます。

拡大・縮小

拡大するには、画像が適切なサイズになるまで、拡大ボタンを押すか長押ししてください。同じく、縮小ボタンも押すか長押しすることによって縮小できます。

またライブ画像を拡大・縮小するもう一つの方法としては、メニューからつまみ動作&ズーム（2本の指の間の距離を延ばしたり縮めたりする動作）を有効にすることができます（第4章参照）。

コントラストの変更

コントラストを変更することができます。

コントラストボタンを押して、コントラストを変更してください。

可能なコントラストモードは以下の通りです。

- ・フルカラー、白地に黒、黒地に白、黄色地に黒、黒地に黄色

メニューからは、以下のほかのコントラストモードも設定できます（第4章参照）。

- ・オレンジ地に黒、黒地にオレンジ、シアン地に黒、黒地にシアン、紫地に黒、黒地に紫、緑地に黒、黒地に緑、黄色地に青、青地に黄色、青地に白、白地に青

ライトの点灯と消灯

ライトを消灯させるには、拡大ボタンと縮小ボタンを同時に長押ししてください。同じ操作で、ライトを再び点灯させることができます。

線とブラインド

画像に横方向に線またはブラインドを表示させることができます。

線を表示・非表示するには、コントラストボタンと拡大ボタンを同時に長押ししてください。

ブラインドを表示・非表示するには、コントラストボタンと縮小ボタンを同時に長押ししてください。

自動フォーカス

メニューからオートフォーカスを、固定または解除することができます（第4章参照）。

オートフォーカスが解除の状態（既定の状態）の場合は、現在撮影中の物体に自動でフォーカスを合わせます。

オートフォーカスが固定の場合、移動しても現在のフォーカスを維持します。

画像を固定する方法

拡大モードで画像を固定させることができます。

画像を固定させるには、対象物の方向に拡大読書器を向けてから、スナップショットボタンを押してください。すると機器がさしている物体のスナップショットが取られます。このスナップショットは、拡大モードに戻るまで、画面上に表示されます。

拡大モードに戻るには、もう1度スナップショットボタンを押してください。

固定した画像の閲覧

固定画像を拡大するには、画像が適切なサイズになるまで、拡大ボタンを押すか長押ししてください。同じく、縮小ボタンを押すか長押しすることによって、縮小できます。

さらに、固定画像を拡大・縮小するもう一つの方法としては、メニューからつまみ動作&ズーム（画面に触れた2本の指の間の距離を延ばしたり縮めたりする動作）を有効にすることができます（第4章参照）。

固定画像のほかの部分を見るには、画面上で指をずらしてください。

ライブ画像の場合と同じく、コントラストボタンを押すことでコントラストを変更できます。

ギャラリーモード

ギャラリーにライブ画像または固定画像を保存するには、拡大モードのときに、スナップショットボタンを約0.5秒押ししてください。ギャラリーに保存されたことを示す保存メッセージが画面上に短く表示さ

れます。

ギャラリーに画像を保存するためのもう一つの方法としては、メニューからタップ&長押し（画面に指を長く置くこと）を有効にすることができます（第4章参照）。

ギャラリーの閲覧方法

ギャラリー内の画像を閲覧するには、コントラストボタンとスナップショットボタンを、同時に押してください。画像を選択するには、画面上で指を左にまたは右にずらしてください。画像を選択するには、画面上の矢印を押すこともできます。

保存されている画像を拡大・縮小するには、拡大・縮小ボタンを押し、または長押ししてください。

さらに、保存された画像を拡大・縮小するもう一つの方法としては、メニューからつまみ動作&ズーム（画面に触れた2本の指の間の距離を延ばしたり縮めたりする）を有効にすることができます（第4章参照）。

ギャラリーを終了し拡大モードに戻るには、画面上の「戻る」ボタンを押すか、コントラストボタンを長押ししてください。

ギャラリーから画像を削除する方法

ギャラリーから特定の画像を削除するには、ギャラリーを閲覧し、削除したい画像まで移動してください（画面上で指を左または右にずらして、あるいは画面上の矢印ボタンを押します）。

また、メニューからタップ&長押し（画面に指を長く置くこと）を有効にすることができます（第4章参照）。

スナップショットボタンを長押しすると削除またはキャンセルを選択できます。削除を確定させるには「削除」ボタンを押してください。削除をキャンセルしたい場合は、「キャンセル」ボタンまたは「コントラスト」ボタンを長押ししてください。すべての画像が削除されると「[から]」と表示されます。

ギャラリーのすべての画像を削除するには、コントラストを長押しして、「ギャラリー削除」を選択してください。（第4章参照）。

外付けの画面を使う方法

内容を外付けの画面（例えばテレビのような画面）に表示させることができます。その場合、付属の HDMI ケーブルを使って外部の画面に

つなげてください。サポートされている HDMI 形式については、付録 B をご参照ください。

第 3 章 パソコンに画像を転送する方法

エキスプロ 8 に保存されたギャラリー画像をパソコンに転送するには、付属の USB ケーブルを使って本製品をパソコンとつなげてください。本製品に「PC 接続済み」というメッセージが表示されます。それから、パソコンのエクスプローラーを使い、ギャラリーからパソコンに画像をコピーまたは貼り付けで画像が転送できます。

本製品は、パソコンと接続時には外付けの USB ドライブまたは外付けのハードドライブと同じように動作します。

ギャラリー画像は、エキスプロ 8 の画像フォルダに保存されます。

本製品から画像をコピーしたり削除したりしている間は、USB ケーブルを絶対に抜かないでください。処理の途中でいくつかの画像が失われてしまう可能性があります。

第 4 章 メニュー

メニューの閲覧と設定の変更

メニューに入るには、コントラストボタンを長押ししてください。メニューを閲覧するには、画面上で指を上または下にずらしたり、画面上の上下矢印を押してください。または、上にスクロールするには拡大ボタンを、下にスクロールするには縮小ボタンを押してください。

特定の項目を選択するには、画面上の項目を指で押してください。

前のメニューに戻るには、コントラストボタンまたは画面上の「戻る」を押してください。拡大モードに戻るには、再びコントラストを押してください。メニューを終了させるには、コントラストボタンを長押しまたは画面上の「戻る」を押してください。

メニューには、以下の項目があります。項目の後ろに[*]の付いたものが工場出荷時の状態です。

ギャラリー（ギャラリー画像の閲覧）

オートフォーカス： 解除した*、固定した

画面の明るさ（画面の明るさのレベルを変更）： 1~9（8*）

タッチ画面（サブメニュー。ジェスチャと振動を有効にするにはタップしてください）

・つまみ動作&ズーム（画面に触れた指2本の間の距離を延ばしたり縮めたりして拡大・縮小してください）

・Vibrations（振動）（*）

・タップ&長押し（ギャラリーに画像を保存するには、拡大モードでタップしてそのまま指で抑え続けてください）

オートオフ（本製品の電源がついた状態にとどまる時間を選択してください： 1分・2分・5分*・10分）

望ましい倍率（本製品を開いたときのデフォルト拡大レベルを変更）： 前の（本製品を閉じたときの拡大レベル）、2倍*~30倍
コントラスト（サブメニュー）

・望ましいコントラスト（本装置が起動する時のコントラストを選択）：前の*（以前使用したコントラスト）、カラー、有効化した諸コントラスト

・メニュー（メニューの色を変更）：白地に黒*、黒地に白、黄色地に黒、黒地に黄色、オレンジ地に黒、黒地にオレンジ、シアン地に黒、黒地にシアン、紫地に黒、黒地に紫、緑地に黒、黒地に緑、黄色地に青、青地に黄色、青地に白、白地に青

・コントラストを有効にする（拡大モードで使用するために「有効化された」色のペアを選択）：白地に黒*、黒地に白*、黄色地に黒*、黒地に黄色*、オレンジ地に黒、黒地にオレンジ、シアン地に黒、黒地にシアン、紫地に黒、黒地に紫、緑地に黒、黒地に緑、黄色地に青、青地に黄色、青地に白、白地に青

線とレターボックス：なし*、一文ごと、レターボックス

照明：オン*、ロー、オフ

メニューのテキストサイズ：小、中*、大

言語：アメリカ英語*、イギリス英語、フランス語（カナダ）、フランス語（フランス）、スペイン語（米国）、スペイン語（スペイン）、ドイツ語、オランダ語、デンマーク語、ポーランド語、ポルトガル語（ポルトガル）、ポルトガル語（ブラジル）、ノルウェー語、イタリア語、スウェーデン語、フィンランド語、ロシア語、チェコ語、日本語、韓国語、アイスランド語、エストニア語、トルコ語、リトアニア語、ハンガリー語、ラトビア、アラビア語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）

表示：50ヘルツ、60ヘルツ*

ギャラリーを削除

工場出荷時の状態

（注：言語がアメリカ英語になります）

製品情報：ソフトウェア、ハードウェア、シリアル番号

第5章 充電

《重要》 充電中は、バッテリーが熱くなりますが、正常です。
ストーブなどの近くで充電しないでください。

コンセントからバッテリーを充電するには：

- ・充電器に USB ケーブルを接続してください。取扱いに注意しながら、USB ケーブルを本製品に差し込み、充電器をコンセントにつなげてください。

- ・バッテリーがフル充電するまで充電してください。空の状態からフル充電するには、約3時間半かかります。

充電中は、バッテリーの充電が開始するときまたは本製品が起動するときに、以下の画像が一時的に表示されます。



稲妻アイコンは、「本製品が充電中である」ことを意味します。

数字は、バッテリー残量をパーセンテージで表しています。

低い電圧が原因で、パソコンの USB からの充電はもっと時間がかかる可能性があります。パソコンから提供される電圧によっては、本製品が全く充電しない場合があります。充電器に付属の USB ケーブルをつなげて、コンセントから充電する方法をお勧めします。

充電時間が伸びることがありますが、充電中にも本製品を使用できます。

バッテリーが完全に放電した時、あるいは長い間本製品が使用されなかった場合、本製品が動作するまでに数分かかる可能性があります。これは正常です。使用中または充電中熱くなりますが、これも正常です。

バッテリー安全注意：

バッテリーを分解・変造しないでください。

付属の充電器だけをご使用ください。

バッテリーを火に近づけたり、高温の場所に置いたり、強い衝撃を加えたり水にぬらしたりしないようご注意ください。

ショートして、過熱・火事・爆発の危険があります。

第6章 困ったときは

起動しない：

電源ボタンを長押ししてください。起動しなければ、バッテリーを充電する必要があるかもしれません。

付属の USB ケーブルで充電器を接続し、コンセントにつなげてください。あるいは USB ケーブルを、動作中のパソコンに接続してください。バッテリーが完全に放電していたら、本製品が動作するようになるまで、数分かかる可能性があります（詳しくは第6章参照）。

画面が真っ黒：

本製品がテーブルの上や平らな場所に置いてあると、画面が真っ暗になっている可能性があります。本製品を持ち上げてみてください。

これで問題が解決しなければ、再起動してみてください。

拡大モードで画像がフォーカスからずれている：

メニューでオートフォーカスが解除したに設定されていることをご確認ください。その後に見ている文書の上で本製品を動かしてみてください。フォーカスが合うはずです。

放置すると電源が切れてしまう：

これはバッテリーを節約するための正常な動作です。標準では、5分間に操作がないと本製品は自動で電源が切れます。オートオフの時間を、1分、2分、5分または10分に設定できます。

色が認識しにくい：

まず、周囲が十分明るいことを確かめてください。

拡大モードでコントラストボタンを押して、別の色の組み合わせを選んでください。

とてもまぶしい：

まぶしさを軽減させるために、別の方向に傾けてください。また拡大ボタンと縮小ボタンを同時に長押ししてライトを消すこともできます。

応答しない：

USB ケーブルを通して充電器に接続されていないことを確かめてくだ

さい。接続されていたら、外してください。電源ボタンを、10秒間押ししてください。それから、再び起動させるには電源ボタンを1秒間押ししてください。

そのほかの問題：

メニューから工場出荷時の設定に戻してみてください。
コントラストボタンを長押ししてください。「工場出荷時の状態」を選択し、「はい」を押してください。

付録A 安全とメンテナンス

本製品の裏面にあるLEDライトを直視しないでください。
本製品を水または高湿度の場所に近づけないでください。
水に沈ませないでください。
掃除する前に、電源を消してください。
付属のケーブルだけをご使用ください。

バッテリー：

充電可能なりチウムイオン内蔵電池がついています。
バッテリーをご自身で交換しないでください。
ストーブなどまたは火の近くで本製品を使用したり保管したりしないでください。高温の環境で保管しないでください。
バッテリーを充電するには、USB対応の電源のみをお使いください。

本製品を分解・変造しないでください。
本製品を水に浸したり濡らしたりしないでください。
本製品をぶついたり落としたりしないでください。
鋭い物またはハンマーで本製品をさしたりたたいたりしないでください。

バッテリーから液体が出てその液体が目に入った場合は、目をこすらず、きれいな水で目をすすぎ、すぐに医療機関を受診してください。
バッテリーから液体が出て、その液体が皮膚に接触した場合は、すぐに接触部分をきれいな水ですすいでください。

液晶画面の掃除：

本製品の電源が切れていて、電源コードが接続されていないことを確かめてください。

液晶画面を掃除するために、付属のクリーニングクロスのような布だけをお使いください。

クリーニングクロスで液晶画面を、丁寧に軽く拭いてください。

液体洗剤で液晶画面を掃除したい場合は、その洗剤は液晶画面の掃除に使える物であることをご確認ください。

製品内部に液体が入らないように、必要最低限の液体だけをお使いください。液体が製品の中に入ってしまうと、故障のおそれがあります。画面上に液体が残らないようにしてください。掃除しにくいところがあれば、上記のやり方で再掃除してください。

掃除するには、家庭用洗剤を使わないでください。

液晶画面に液体を直接吹きかけないでください。

ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤などの溶剤を使用しないでください。

液晶画面を掃除するために、ペーパータオルを使用しないでください。

付録B 仕様

寸法：24 x 204 x 153.2 mm

画面：8インチ

重量：580 g

入力電力：USB コネクタ 5V・3A、または9V・2A、または12V・1.5A

バッテリー使用時間：約4時間半

充電時間：約3時間半（電源が入っていない状態で）

対応HDMI形式：

1280 x 720 p 60Hz, 50Hz

1920 x 1080 p 60Hz, 50Hz, 24Hz

1920 x 1080 i 60Hz, 50Hz

動作条件：

気温：10～40℃

湿度：20～80%

保管条件：

気温：-20～+60℃

湿度： 10～95%

付録 C 保証

ご購入日より1年間保証します。

この保証は、故障が不適切使用、悪用と過失の結果でない限り、一切の場合に適用されます。

不適切使用とは、本取扱説明書で説明している使用以外の使用です。

いかなる場合においても、間接損害や結果的損害については、販売店は責任を負いません。

本製品は保証書と一緒に提出されなければ、製品交換・修理が行われません。保証書を保管してください。本製品を発送する場合、購入の際のパッケージをお使いください。

エキスプロ8 ユーザーガイド

2018年2月版

株式会社アメディア

〒176-0011 東京都練馬区豊玉上 1-15-6 第10 秋山ビル 1階

電話 : 03-6915-8597 FAX : 03-3994-7177

<http://www.amedia.co.jp/>

記載された仕様、デザインなどは予告なしに変更することがあります。