

『快速よむべえ』読み上げモデル (YK-2100)設置ガイド

梱包の確認

<p>本体</p> 	<p>カメラ</p> 	<p>操作パネル</p> 
<p>原稿ガイド</p> 	<p>カメラ用 USB ケーブル</p> 	<p>本体用 AC アダプタ&電源コード</p> 
<p>下敷きマット</p> 		

書類と CD

- 読み取り精度確認シート
- 手書き読み取りサンプルシート
- 図解取扱説明書
- 録音取扱説明書
- 設置ガイド
- 使用許諾契約書
- ユーザー登録はがき(保証書)
- サービスガイド

カメラの設置

以下の説明は設置例です。設置場所や向きはご自由に変えていただいて構いません。

1. 水平な机の上に 50cm 角程度のスペースを確保し、付属の下敷きマットを敷きます。下敷きマットの角にあけた丸い穴が左奥へくるようにします。下敷きマットを利用しなくても快速よむべえの動作に支障はありますが、用紙などは下敷きマットがあるとしっかりと動かなくなり、取り除くときも指でつまみやすくなります。



2. 原稿ガイドは下敷きマット正面の奥に置きます。向きはハンドルのように飛び出たところが右へ、直線のところが手前へくるようにします。



3. カメラは差し込み口を奥に向け、底の部分を原稿ガイドの穴にはめて真っすぐ立てます。



4. カメラの支柱の高さを変えると撮影範囲が変わります。撮影範囲は支柱の最も低いところで A4 サイズ、最も高いところで A3 サイズになります。支柱は上の部分を手で引っ張ると高くなります。



5. カメラをはめる原稿ガイドの穴の場所は撮影範囲が A4 の場合と A3 の場合とで異なります。

- A4 の場合は穴の右奥のところにカメラをはめます。
- A3 の場合は穴の左手前のところにカメラをはめます。



- カメラは二つ折りに畳んだ状態になっており、写真のように腕を水平に 90 度開くことができます。開いた腕の先のほうにあるレンズが真下の印刷物を撮影します。(レンズには触らないでください)



機器の接続

1. カメラの突起が付いた接続口側へカメラ用 USB ケーブルを接続します。



2. もう片方は、本体背面の USB 接続口(突起の付いた水色の口)に差し込みます。



3. 操作パネルのケーブルは本体背面にある USB 接続口へ差し込みます。接続できる口がいくつかありますが、どこに接続しても構いません。



4. ACアダプタのDCプラグを本体背面に接続し、電源コードは家庭用コンセントに接続します。



設置上の注意

- カメラのレンズは汚ごしたり、傷つけたりしないようにしてください。
- 本体 は使っていると熱くなることがあるので、皮膚が触れたままになる場所に置かないでください。
- 本体 は高温になると誤動作する恐れがあるので、熱のこもる場所に置かないでください。また、本体 の上には物を載せたり、被せたりしないでください。
- ケーブルやその接続口には過度な力を加わえないでください。

機器の起動


1. 本体の電源を入れます。1分程すると起動したことを知らせる音声が聞こえてきます。



2. カメラの腕の先に LED ライトのタッチセンサースイッチがあります。周囲の環境や印刷物の紙質によって LED ライトのオン/オフは認識結果に影響を与えることがあります。



3. 操作パネルはどこに置いてかまいませんが、操作パネルのケーブルが印刷物の上にはのらないよう注意してください。

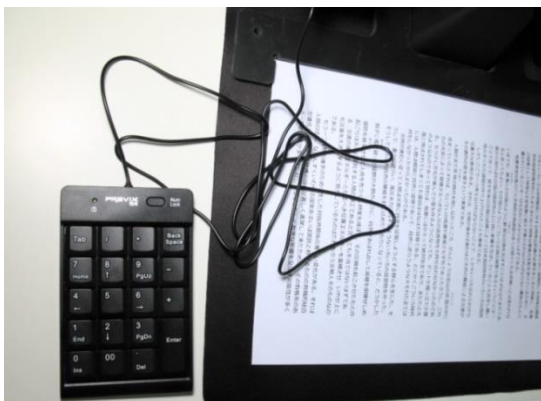

4. 読みたい用紙は原稿ガイド右の直角のところに用紙の角がぴったりとはまるように置きます。



本ガイドの設置方法はあくまで標準的なものです。お使いになる環境にあわせ、機器の置き方を自由に変えていただいて構いません。

