

オーキー（Aukey）取扱説明書

1. はじめに

携帯型電子ルーペのオーキー（Aukey）（以下「本製品」）をお選びいただきありがとうございます。

読んだり、書いたり、地図、メニューまたはラベルなどを見るために、どうぞ、本製品をご使用ください。

本製品の使用にあたって、ご質問、ご感想などがありましたら、販売店、またはアメディアまでご連絡ください。

本取扱説明書について

本取扱説明書は、本製品の特徴と操作について説明しております。

本取扱説明書に掲載された写真・画像は、お手持の本製品と多少異なる可能性もございますので、ご了承ください。

ご使用前に、必ず本取扱説明書をお読みください。

また、いつでも参照するために、本取扱説明書をお手元に保管しておいてください。

2. 安全上のご注意

※ ここに示した注意事項は安全に関する内容を記載しています。お使いになる前によくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 本製品を急激な極端な気温や湿度の変化がある環境では使用しないでください。
- 本製品をストーブ・パネルヒーターの近く、または日光の直接あたる場所に置かないでください。
故障の原因になるおそれがあります。
- 本製品は大切に请使用ください。
乱暴な使用は、内部部品などの故障の原因になります。
- 本製品を分解しないでください。修理が必要な場合には、お近くの販売店またはアメディアまでご連絡ください。
- どの箇所も開けないでください。
開けた場合には、保証が無効になる場合がございます。
- 洗剤または研磨剤は、本製品を故障させるので、使用しないでください。
またカメラのレンズに直接触らないようにしてください。
- 同梱されている AC アダプタをご使用ください。
- 本製品を強くたたいたり振動させたり抑えたり落としたりしないでください。
- 本製品を氷点下 1 度以下や 41 度以上または多湿な場所での保管、使用は避けてください。
- 本取扱説明書に従わない本製品の使用の場合には、保証は無効になります。

3. パッケージの内容

本製品パッケージには次のものが入っています。




- (1) オーキー（Aukey）小型拡大読書器（本体）
- (2) AC アダプタ
- (3) リストバンド（本体に装着されています。）
- (4) 脱着式スタンド（本体に装着されています）
- (5) 取扱説明書（本書）
- (6) キャリングケース
- (7) 保証書・ユーザー登録カード

万が一パッケージに入っていないものがあれば、販売店または、アメディアまでご連絡ください。

4. 各部の名称

上記の図は、本製品の主な各部を示しています。

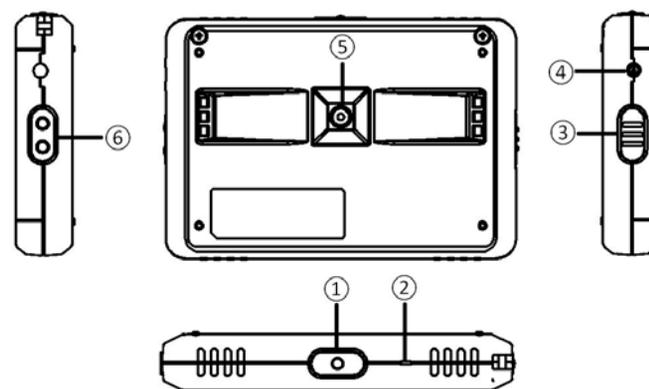

- ① 電源ボタン／表示モードボタン
- ② 充電ステータス表示ライト
- ③ イメージボタン
- ④ 電源アダプタジャック
- ⑤ カメラ
- ⑥ 拡大ボタン

5. 準備

電源 ON/OFF

本製品の電源を入れるには、電源ボタン／表示モードボタンを4秒間押し続けてください。

電源を切る時も、同じ操作です。

起動すると、最初の色表示はフルカラーモードに設定されています。

拡大したいものの上に、直接置かずに1cmほど離して使用してください。

脱着式のスタンドを使用すると最適の距離で表示できます。

拡大の設定方法

イメージボタンを押すことによって、拡大率を切り変えることができます。2段階で調節できます。

色表示切替

画面に表示される色を選択するには電源ボタン／表示モードボタンを押してください。3つの表示が選べます。

フルカラー	文書、写真などフルカラー
白黒反転	黒色の背景に白色の文字
白黒	白色の背景に黒色の文字

静止画像


拡大表示中にイメージボタンを押すと画面が静止します。

再度押すと拡大表示に戻ります。

- 静止画像でも色表示の変更は、可能です。

脱着式スタンド

長い時間使用する際にスタンドを取り付けてご使用ください。

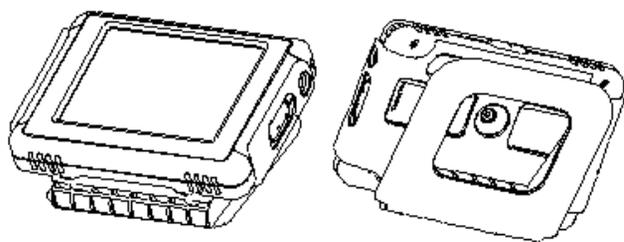

バッテリー表示ライト

表示ライトが赤の時は、充電してください。

充電中は、緑に点灯します。

6. 仕様

拡大率	1.9倍、3.9倍
拡大	2段階
色表示	カラー、白黒、白黒反転
静止画像	可能
静止画像中の色表示の変更	可能
リチウムイオンバッテリー量	1500mAh
連続使用時間	約2.5時間
充電時間	約2.5時間
画面サイズ	3.5インチ液晶 TFT
本体サイズ	105×72×17mm (幅×奥行×高さ)
重量	120g
ACアダプタ入力	5V 1.5A
使用環境条件	気温：0度～40度 湿度：70%以下（ただし結露のないこと）

7. 保証

同梱の保証書は大切に保管してください。

保証期間中に修理を依頼する場合は、保証書が必要となります。バッテリー等消耗品を除き、購入後2年間の保証が有効です。

保証期間中は、本製品が故障した場合、それがお客様の過失によるものでなければ、無償で修理または交換いたします。

なお、その場合には、本製品を返送して頂きますので、梱包用の箱は大切に保管しておいてください。

故障と思われる現象が発生した場合には、まずご購入店にご連絡ください。

お客様の機器の現象を正確に把握した上で、お送り頂く必要がある場合には、送り先をご連絡いたします。

以下の場合には、保証は無効となります。

- 安全上のご注意に反して利用した場合
- お客様の過失による故障または過剰な物理的付加による故障の場合
- 極端な条件で使用した場合（たとえば非常に暑い場所など）
- 通常の使用中に生じた傷や汚れの場合
- 火災・地震・風水害などの天災による損傷・故障の場合

本取扱説明書の内容は、予告なく変更されることがございますが、ご了承ください。

製造元 Aumed Group Corp.
輸入販売元 株式会社アメディア
〒176-0011 東京都練馬区豊玉上 1-15-6
第10秋山ビル1階
TEL: 03-6915-8597 FAX: 03-3994-7177
ホームページ: <http://www.amedia.co.jp/>