

キャプチャー取扱説明書



本書は、キャプチャー (Capture) の取り扱い説明書です。

作成に当たっては最善を尽くしておりますが、誤りを発見したときはアメディアまでご連絡をいただければ幸いです。

目次

1. 安全上のご注意	3
2. 付属品	5
3. 各部の名称	6
4. 操作	7
・バッテリーの取り付け方	7
・充電について	7
・ネックストラップの取り付け方	8
・電源の ON/OFF	8
・拡大倍率の設定	8
・表示モードの切替	9
・静止画像モード	10
・ロックの設定と解除	11
・画像の消去方法	11
・筆記用スタンド	12
・キー操作時のビープ音の ON/OFF	12
・カメラのライトの ON/OFF	12
・明るさの設定	13
・線の太さの設定	13
・テレビに接続する方法	14
・メモリ機能	14
5. 仕様	15

1. 安全上のご注意

【 注意記号 】



火災



感電

【 行為禁止記号 】



禁止



分解禁止



水濡れ禁止



強制



接触禁止



警告

●本機を、ストーブ・パネルヒーターの近く、または日光の直射あたる場所に置かないでください。



●本機を、ほかの電子機器または適切に保護されていない医療機器の近くで使用しないでください。電子磁気的な妨害が発生するおそれがあります。



●本機を分解しないでください。修理が必要な場合には、お求めになった販売店またはアメディアまでご連絡ください。また、分解した形跡がある場合は保証が無効になります。



●同梱されているACアダプタを必ずご使用ください。



●濡れた手で電源コードを抜き差ししないでください。感電の原因となります。



●9度以下または41度以上の環境では、本機を使用しないでください。



●本取り扱い説明書に従わずに本機を使用する場合には、保証は無効になります。



注意

●本機をほかの場所に移動させる場合は、まず電源コードそのほかのケーブルを外部コネクタから外してから移動してください。



●本機を掃除する前に、必ず電源を取り外してください。外側を掃除するためには、やわらかい布をお使いください。洗剤や研磨剤は、本機を故障させる原因となりますので、使用しないでください。






2. 付属品

次のものが入っています。

- ・ 本体
- ・ ショートストラップ
- ・ 取扱説明書（本書）
- ・ ビデオケーブル
- ・ キャリングケース
- ・ AC電源アダプター
- ・ リチウムバッテリー
- ・ 保証書


3. 各部の名称

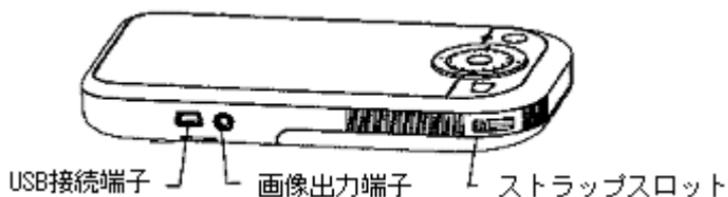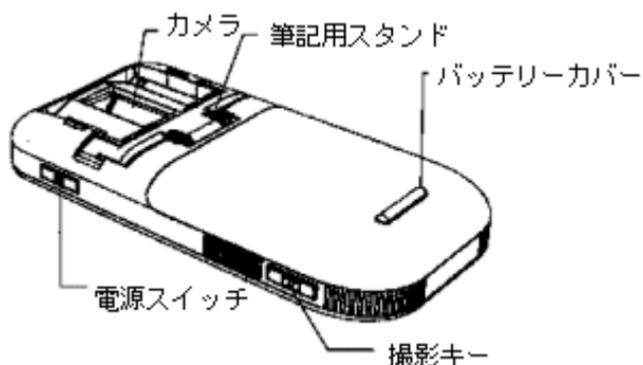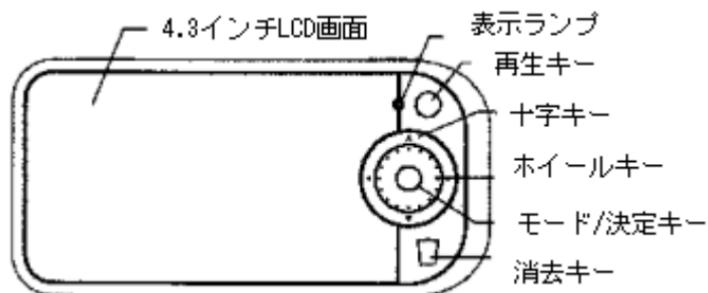

4. 操作

・バッテリーの取り付け方

次の手順でバッテリーを本体に挿入してください。

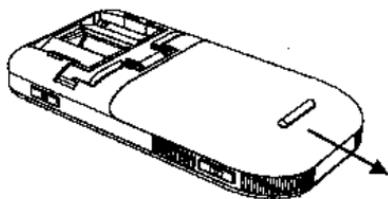

1. 本体を裏返します。
2. バッテリーカバーをスライドして取り外します。
3. バッテリーを挿入します。
4. バッテリーカバーをはめて、元の位置までスライドさせます。

・充電について

本機をはじめて使用する前に充電してください。

本体のUSBポートに電源アダプターを接続し、電源アダプターをコンセントに接続してください。充電中は、表示ランプは赤に点灯します。充電が完了すると表示ランプが消えます。バッテリーの残量が少なくなると画面左下に乾電池のようなマークが表示され、バッテリーがなくなると

「LOW Battery」と赤字で表示され電源が切れます。バッテリーの満充電には約4時間かかり、約3.5時間使用できません。

・ ネックストラップの取り付け方



上図のように、ストラップの先にある小さなループをストラップスロットに通します。ストラップのもう片方を小さなループに通します。

・ 電源のON/OFF

3秒間電源スイッチを押し続けると表示ランプが緑に点灯し電源が入ります。

電源を消すには、同じく電源スイッチを3秒間押し続けてください。3分間、何も操作が行われないと、本機は自動的に電源が切れます。

・ 拡大倍率の設定

拡大倍率を上げるには、ホイールキーを時計回りに回してください。倍率を下げるには、反時計回りに回してください。拡大倍率は2倍から16倍までです。キャプチャーをテレビ画面に接続することによって、より大きく表示できます。

・表示モードの切替

次の二つのモードがあります。

1. 通常モード

モード／決定キーを押すと、次のモードをトグル式で切り替えることができます。

- ・フルカラー
- ・グレーモード
- ・黒い背景に白のテキスト
- ・白い背景に黒のテキスト
- ・青い背景に白のテキスト
- ・白い背景に青のテキスト
- ・黒い背景に黄色のテキスト
- ・黄色い背景に黒のテキスト
- ・黄色い背景に青のテキスト
- ・青い背景に黄色のテキスト

2. お気に入りモード

お気に入りモードの状態でもモード／決定キーを押すと、3つのモードをトグル式で切り替えることができます。ひとつは、フルカラーモード、残りの2つはお気に入りのコントラストモードとその反転モード（たとえば「青の背景に白のテキスト」に対して「白い背景に青のテキスト」）です。

お気に入りモードを設定するには、通常モードでお気に入りのコン

トラストカラーモードを選択します。次に、ビープ音が鳴るまで、2秒間モード／決定キーを押し続けます。その後、モード／決定キーを押すとフルカラーモードと先ほど選択したコントラストカラーモードと、その反転モードと3つのモードに切り替わります。再度、通常モードに戻す場合は、2秒間モード／決定キーを押し続けます。

・静止画像モード

イメージや文字を保存したいときは、撮影キーを使用します。保存したい物体の上にキャプチャーを置いて撮影キーを押します。画面が静止して、その画像が本体に保存されます。再度、撮影キーを押すと元に戻ります。

保存した画像を確認したいときは再生キーを押します。

直前に保存された画像が選択されています。

画像を拡大して表示したい場合は、モード／決定キーを押します。ホイールキーを回すことによって、イメージを拡大・縮小することができます。拡大した後に十字キーを押すと上下左右に表示位置をかえることができます。

更に、モード／決定キーを押すとコントラストモードを切り替えることもできます。

以前、取り込んだ画像を表示したいときは、再生キーを押した後に十字キーの下キーを押すと1枚ずつ前に戻ります。3枚ずつ前に戻りたいときは右キーを押します。

・ ロックの設定と解除

大切な画像はロックをかけて削除できないようにすることができます。再生キーを押した後にロックしたい画像が選択されているときに撮影キーを押します。

画面左下にカギのマークが表示されロックされます。ロックを解除する場合は、もう一度、撮影キーを押します。

なお、ロックされた画像は自動的に先頭に移動されます。


画像は最大100枚まで保存できます。100個を超えると、自動的に、ロックされていない最も古い画像を消去します。

・ 画像の消去

再生キーを押した後、以前、保存した画像が表示されますので、上キーまたは下キーを押して削除したい画像を選択します。その後、消去キーを押します。

「Press Again To Delete」と表示されますので、もう一度消去キーを押すと消去されます。キャンセルしたい場合は、消去キー以外のキーを押すとキャンセルできます。

・筆記用スタンド

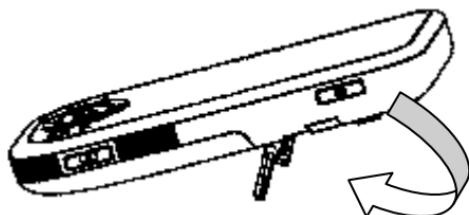

上図のように筆記用スタンドを広げて、カメラの下で書きます。

・キー操作時のビープ音のON/OFF

出荷時は、キー操作時にビープ音がありません。ビープ音が鳴るようになるには、消去キーを3秒間押し続けます。

もう一度、消去キーを3秒間押し続けると、ビープ音が鳴らなくなります。

・カメラのライトのON/OFF

ライトを消すには、モード/決定キーを5秒間押し続けます。

ビープ音が、2回鳴りライトが消灯します。もう一度、モード/決定キーを5秒間押し続けると、ライトが点灯します。

・明るさの設定

明るさの設定をするには、再生キーを3秒間押し続けます。現在、設定されている状態がバーで表示されます。その後、上キーまたは右キーを押すと明るさが増加し、下キーまたは左キーを押すと明るさが減少します。

明るさを調節した後は、モード／決定キーを押してください。なお、このモードは、5秒間キーが押されないと、自動的に終了します。

・線の太さの設定

文字の線の太さを調節することができます。拡大表示後、文字と文字の間を広げたいときは細く調節することで見やすくなります。逆に細かい文字の時は太く調節することで見やすくなります。

1. 左キーを3秒間押し続けます。現在、設定されている状態がバーで表示されます。
2. ホイールキーを時計回りに回すと線が太くなり、反時計回りに回すと線が細くなります。調整後、モード・確認ボタンを押して、設定モードを終了させてください。なお、このモードは、5秒間キーが押されないと、自動的に終了します。

・テレビに接続する方法

画像出力端子とお持ちのテレビの外部入力端子を付属のビデオケーブルで接続することで、テレビの画面に表示することができます。接続後は、本機の画面は消えてテレビの画面表示のみとなります。接続後、テレビの画面に表示されない場合は、一度、ビデオケーブルを抜いてください。撮影ボタンを3秒間押し続けると「TV Format」と表示され、NTSCとPALと選択できます。上キーまたは下キーを押して設定を変更してください。その後、もう一度、テレビの外部入力端子と接続しなおしてください。

・メモリ機能

本機は、倍率や、表示モードなど一度、設定された内容を記憶しますので、電源を切った後、都度、設定する必要はございません。

5. 仕様

1. 拡大倍率：2～16倍
2. 画像保存：100枚まで
3. 外形寸法：160×80×24mm（幅×奥行×高さ）
4. 表示モード：10種類（フルカラーモード、グレイモード、黒に白、白に黒、青に白、白に青、黒に黄色、黄色に黒、黄色に青、青に黄色）
5. フォーカス：自動フォーカス
6. 画面：4.3インチワイドTFT
7. 画像出力：PAL/NTSC
8. 電気節約モード：3分間操作がないと、自動的に電源OFF
9. バッテリー：リチウムバッテリー（3.5時間の連続使用）
10. バッテリーレベル表示：あり
11. 電源アダプター：入力：AC110～240V,出力：DC5.0V,1A
12. 充電時間：4時間
13. 重量：約163g（バッテリーを含まない状態で）
14. 操作及び保存条件：湿度 69%以下、気温：10～40°

キャプチャー（Capture）取扱説明書

2012年7月版

株式会社アメディア

〒176-0011 東京都練馬区豊玉上 1-15-6 第10 秋山ビル 1階

電話：03-6915-8597 FAX：03-3994-7177

<http://www.amedia.co.jp/>

