


アイシー

(Eye-C)

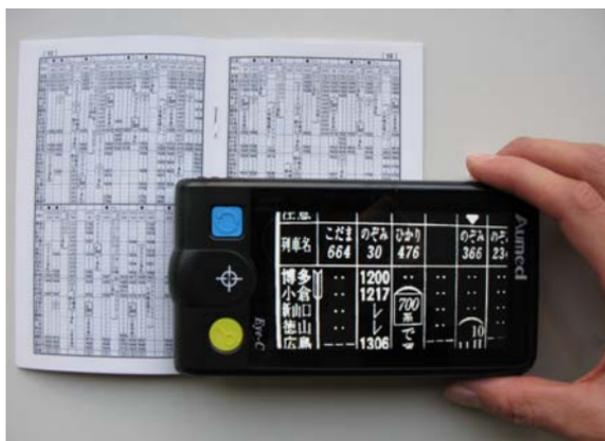

取扱説明書

目次

1. はじめに	2
本取扱説明書について	2
2. 安全上のご注意	3
3. パッケージの中身	4
4. 各部の名称	5
5. 準備	6
電源ON/OFF	6
拡大の設定方法	6
色表示切替	7
静止画像	7
筆記用スタンド	8
画面の明るさ設定	8
自動電源オフ	9
バッテリー表示ライト	9
6. 仕様	10
7. 保証	11

1. はじめに

携帯型拡大読書器のアイシー（Eye-C）（以下「本製品」）をお選びいただきありがとうございます。読んだり、書いたり、地図、メニューまたはラベルなどを見るために、どうぞ、本製品をご使用ください。

本製品の使用にあたって、ご質問、ご感想などがありましたら、販売店、またはアメディアまでご連絡ください。

本取扱説明書について

本取扱説明書は、本製品の特徴と操作について説明しております。

本取扱説明書に掲載された写真・画像は、お手持の本製品と多少異なる可能性もございますので、ご了承ください。

ご使用前に、必ず本取扱説明書をお読みください。

また、いつでも参照するために、本取扱説明書をお手元に保管しておいてください。

2. 安全上のご注意

- ※ ここに示した注意事項は安全に関する内容を記載しています。
お使いになる前によくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 本製品を氷点下1度以下や41度以上または多湿な場所での保管、使用は避けてください。
 - 本製品を、ストーブ・パネルヒーターの近く、または日光の直接あたる場所に置かないでください。故障の原因になるおそれがあります。
 - 本製品は大切に请使用ください。乱暴な使用は、内部の部品などの故障の原因になります。
 - 本製品を分解しないでください。修理が必要な場合には、お近くの販売店またはアメディアまでご連絡ください。
 - どの箇所も開けないでください。開けた場合には、保証が無効になる場合がございます。
 - 洗剤または研磨剤は、本製品を故障させるので、使用しないでください。またカメラのレンズに直接触らないようにしてください。
 - 同梱されているACアダプタを请使用ください。
 - 本製品を強くたたいたり振動させたり抑えたり落としたりしないでください。
 - 本取扱説明書に従わない本製品の使用の場合には、保証は無効になります。

3. パッケージの内容


本製品パッケージには次のものが入っています。



- (1) アイシー (Eye-C) 携帯型拡大読書器 (本体)
- (2) ACアダプタ
- (3) キャリングバッグ
- (4) カメラ拭き用布
- (5) 手首用ストラップ
- (6) 首掛け用ストラップ
- (7) 取扱説明書 (本書)
- (8) 保証書・ユーザー登録カード

万が一パッケージに入っていないものがあれば、販売店または、アマディアまでご連絡ください。

4. 各部の名称

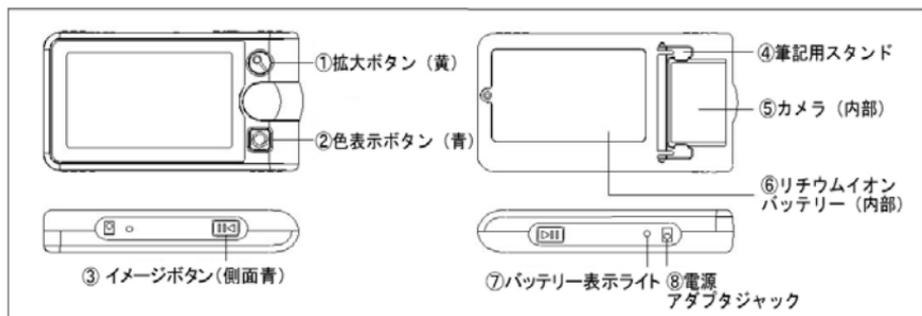

上記の図は、アイシー (Eye-C) の主な各部を示しています。

- ① 拡大ボタン (黄色 )
- ② 色表示ボタン (青色 )
- ③ イメージボタン (側面青色 )
- ④ 筆記用スタンド
- ⑤ カメラ (内部)
- ⑥ リチウムイオンバッテリー (内部)
- ⑦ バッテリー表示ライト
- ⑧ 電源アダプタジャック

5. 準備

電源ON/OFF

本製品の電源を入れるには、上面にある拡大（黄色 ）または色表示（青色 ）ボタンを3秒間押し続けてください。

電源を切る時も、同じ操作です。

起動すると、最初は色表示モードはフルカラーモードに設定されています。

拡大の設定方法

拡大（黄色 ）ボタンを押すことによって、拡大率を切り変えることができます。5段階で調節できます。

スタンドを閉じた状態では、4倍、5.5倍、8倍、11倍と16倍と調節できます。

スタンドを広げた状態では、2.5倍、3.5倍、5倍、7倍と10倍と調節できます。

色表示切替

画面に表示される色を選択するには色表示（青色 ）ボタンを押してください。7つの表示が選べます。

フルカラー	文書、写真などフルカラー
白黒	白色の背景に黒色の文字
白黒反転	黒色の背景に白色の文字
黄色に青表示	黄色の背景に青色に文字
青に黄色表示	青色の背景に黄色の文字
白に青表示	白色の背景に青色の文字
黒に黄色表示	黒色の背景に黄色の文字


静止画像

拡大表示中にイメージ（）ボタンを押すと画面が静止します。再度押すと拡大表示に戻ります。

- 静止画像表示中では、電気を節約するために自動的にランプが消えます。
- 静止画像でもサイズの拡大、色表示の変更は、可能です。


筆記用スタンド

本製品の下面のスタンドを広げると、文字を書くことができます。下の絵を参考にしてください。

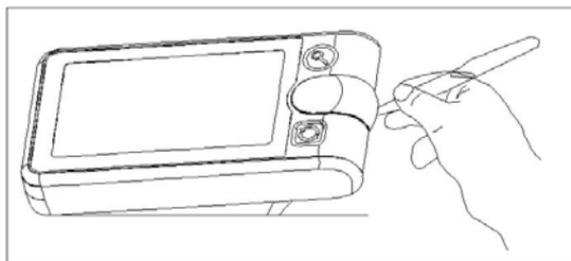

画面の明るさ設定

イメージ (▶) ボタンを3秒間押し続けると、画面に明るさステータスバーが表示されます。下の絵をご覧ください。

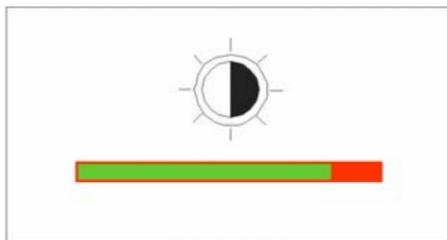

明るさレベルは、6段階で調節できます。

拡大 (黄色 (🔍) ボタンを押すと明るくなり、色表示 (青色

(🔍) ボタンを押すと暗くなります。設定後は、再度イメー

ジ (▶||) ボタンを3秒間押し続けてください。

自動電源オフ

本製品は、自動電源オフ機能をもっています。

電源投入中は、バッテリーを節約するため、3～4分間操作がない場合には、ライトと画面は自動的に消えます。

上面のどちらかのボタンを押すと、画面表示が戻ります。

また、4～5分間操作がない場合には、電源が自動的に切れます。

静止画像中は、10～12分間操作がない場合、電源が自動的に切れます。

バッテリーが切れる前に、画面にバッテリー記号が表示されます。この記号の色は赤と白に交互に変わります。この記号は、バッテリーを充電するよう警告します。

ACアダプタのジャックの横にあるLEDランプはバッテリー表示ライトです。

バッテリー表示ライト

表示ライトが赤の時は、充電してください。

充電中は、緑に点灯します。充電が完了すると消灯します。

6. 仕様

拡大率	2.5倍から16倍まで
拡大	5段階
色表示	7種類
静止画像	可能
静止画像中に画像の 拡大と色表示の変更	可能
筆記	可能
リチウムイオンバッテリー量	3000mAh
連続使用時間	約4～5時間
充電時間	約4～6時間
バッテリー節約機能	あり
画面サイズ	4.3インチ
本体サイズ	152×81×28mm (幅×奥行×高さ)
重量	230g
A Cアダプタ入力	110～240V
使用環境条件	気温：0度～40度 湿度：70%以下（ただし結露のないこと）

7. 保証

同梱の保証書は大切に保管してください。

保証期間中に修理を依頼する場合は、保証書が必要となります。バッテリー等消耗品を除き、購入後2年間の保証が有効です。

保証期間中は、本製品が故障した場合、それがお客様の過失によるものでなければ、無償で修理または交換いたします。

なお、その場合には、本製品を返送して頂きますので、梱包用の箱は大切に保管しておいてください。

故障と思われる現象が発生した場合には、まずご購入店にご連絡ください。

お客様の機器の現象を正確に把握した上で、お送り頂く必要がある場合には、送り先をご連絡いたします。

以下の場合には、保証は無効となります。

- 安全上のご注意に反して利用した場合
- お客様の過失による故障または過剰な物理的付加による故障の場合
- 極端な条件で使用した場合（たとえば非常に暑い場所など）
- 通常の使用中に生じた傷や汚れの場合

- 火災・地震・風水害などの天災による損傷・故障の場合
本取扱説明書の内容は、予告なく変更されることがございますが、ご了承ください。

製造元 **Aumed Group Corp.**

輸入販売元 **株式会社アメディア**

〒169-0051

東京都新宿区西早稲田2-15-10

西早稲田関口ビル3階

TEL: 03-5286-7511 FAX: 03-5286-2567

ホームページ: <http://www.amedia.co.jp/>

