

インターネット dongle の使い方

※ dongle の先端を回して USB を開きます。



※よむべえスマイルの方は本体前面にある USB の口に dongle を挿します。



※快速よむべえの方は本体にある USB の口に dongle を挿します。




クラウド認識

インターネット・ dongle を USB ポートに装着してご利用ください。

<操作>

通常の認識操作	右下の Enter (細長いキー) を 2 回押す。
クラウド認識操作	左上の Tab (角のキー) を押したまま、離さずに右下の Enter (細長いキー) を 2 回押す。
読取翻訳	右上の BS (角のキー) を押したまま、離さずに左上の左から 2 番目の / (スラッシュキー) を 2 回押す。
通帳読み取り	右上の BS (角のキー) を押したまま、離さずに右下の Enter (細長いキー) を 2 回押す。

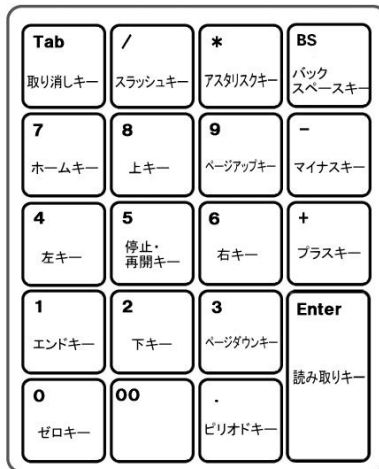

クラウドサービスには、「クラウド認識」と「翻訳」の機能があります。

「クラウド認識」 1 回当たり 1 カウント

「クラウド翻訳」 1 回当たり 2 カウント

設定変更メニューで**読み取り(Enter)キー**でクラウド認識に変更することもできます。
詳しくはアメディアまでお問い合わせください。

お試しプランで気に入って頂けましたら、1ヶ月のお試し期間中に、ミニプラン(3ヶ月)を契約頂きます。

契約期間：3ヶ月

費用(3ヶ月分)：4,950円(税込)

3ヶ月ごとに請求書をメールまたは郵送でお送りします。入金確認をもって契約更新とします。

よむべえネットパックを終了したい場合は、インターネット・dongle を返却頂きます。

詳しくは、アメディアまでお問い合わせください。